

BELOTERO® REVIVE

ПРОЦЕДУРА
**AQUA
GLOW**
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ



МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ
НАБ., 10, БЛОК С «БАШНЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ»

РОССИЯ
1 2 3 1 1 2

ТЕЛ.: +7 (495) 653 8 555
ООО «МЕРЦ ФАРМА»



ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
BE-viveR

В КОЛЛЕКЦИИ MERZ AESTHETICS®

BELOTERO® REVIVE

BELOTERO® REVIVE

Перекрестно связанная **ГК 20 мг/мл + глицерин 17,5 мг/мл без лидокаина**, процесс перекрестного связывания посредством технологии КПМ^{1,2}.

Предназначен для восстановления качества кожи, ревитализации и регидратации, улучшения эластичности и упругости кожи, а также разглаживания поверхностных тонких морщин¹.

Полная деградация **Belotero® Revive** после инъекции составляет **6-8 месяцев**^{1,2}.



 **ГЕЛЬ ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ,**
в шприце объемом 1,0 мл – 1 шт.

 **ИГЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30G ½”**
(0,30 x 13 мм) – 2 шт.

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ТЕХНИК ИНЪЕКЦИИ¹:

-  техника последовательного прокола,
-  веерообразная,
-  поперечной штриховки или последовательная микропунктурная.

 **Belotero® Revive** можно вводить по схеме коррекции **от 1 до 3 инъекционных сессий**¹.

 Минимальный интервал между повторными сессиями составляет **4 недели**¹.

 Полную схему коррекции можно возобновить не ранее чем через 6 месяцев, **в этом случае максимальная годовая доза составит 24 мл**¹.

МОНОИСПОЛЬЗОВАНИЕ

улучшение качества кожи, увлажненности, эластичности, сияния, а также при работе с фотоповреждениями кожи, при подготовке к аппаратным процедурам.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 40+

для комплексного улучшения качества кожи: тургор, эластичность, увлажненность, сияние.

- Belotero® Revive* может применяться в сочетании с другими продуктами *Belotero®* во время одной инъекционной процедуры при условии введения в разные зоны лица.
- Belotero® Revive* может применяться в комбинированных протоколах коррекции, например, в комбинации с ботулиническим токсином и/или кальция гидроксиапатитом (*Радиес*), но только при введении в разные зоны лица.
- Клинические данные по инъекционному введению *Belotero® Revive* в области, в которые уже были введены другие эстетические продукты или проведены эстетические процедуры, отсутствуют.

1. Инструкция по применению медицинского изделия Belotero Revive.
2. Kersch M, Prager W, Fischer TC, Gauglitz GG, Pavicic T, Kühne U, Kravtsov M, Hofmann M, Dersch H, Sattler S. Facial Skin Revitalization with Cohesive Polydensified Matrix-HA20G: Results from a Randomized Multicenter Clinical Study. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2021 Dec 3;9(12):e3973. doi: 10.1097/GOX.0000000000003973.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА РЕКОМЕНДОВАНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ.